

Mascarilla Descartable 3 Pliegues



Descripción

Nombre del producto: Mascarilla descartable 3 pliegues

Ámbito de aplicación: Es adecuado para el cuidado de la salud en un entorno general y proporciona una barrera física contra virus, bacterias, fluidos corporales, partículas, etc.

Instrucciones de uso

1. Use la máscara con la parte azul hacia afuera, los cinturones puestos y la pinza nasal puesta hacia arriba.
2. Estire la mascarilla completamente sobre la nariz, la boca y la barbilla.
3. Ajuste la pinza para la nariz y presiónela en una posición cómoda.
4. Mascarilla rota, húmeda o malolientes se debe reemplazar de inmediato.

Contraindicación: Ninguna

Precaución

1. Lea detenidamente esta instrucción antes de usar. La máscara vencida no se puede usar.
2. Verifique el embalaje antes de usar. No se puede usar la máscara en un embalaje dañado.
3. La máscara usada debe desecharse en los lugares asignados.
4. Se recomienda reemplazar la máscara entre 4 y 6 horas.


Condición de almacenamiento y transporte

Almacenamiento bien ventilado y no corrosivo

Temperatura de almacenamiento: 5 °C -40 °C

Humedad de almacenamiento: ≤85% RH


Protección contra la humedad y la luz solar durante el transporte.

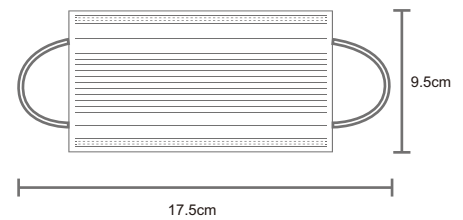

Cuenta con Certificación:



Especificación

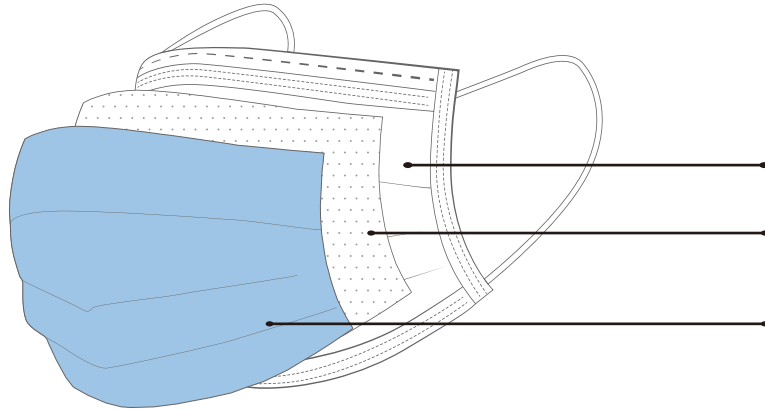

Tela no tejida de polipropileno hilado

Absorbe el calor. Mantiene su piel seca y cómoda.


Fina tela no tejida.

Filtra partículas no oleosas en el aire.

Tela no tejida de polipropileno hilado


Bloquea objetos visibles como gotas

Especificación

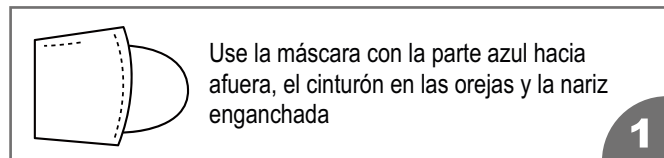


Use la máscara con la parte azul hacia afuera, el cinturón en las orejas y la nariz enganchada

1

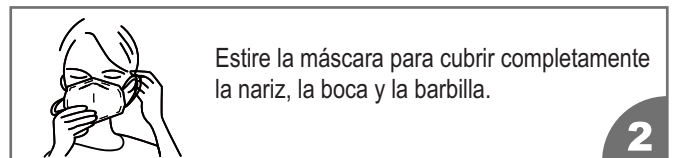


Estire la máscara para cubrir completamente la nariz, la boca y la barbilla.

2

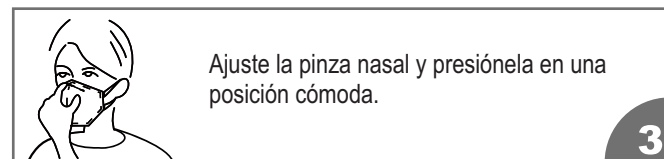

Ajuste la pinza nasal y presiónela en una posición cómoda.

3

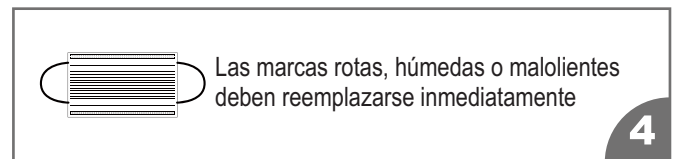

Las marcas rotas, húmedas o malolientes deben reemplazarse inmediatamente

4

- Quítese la máscara por la oreja hacia atrás.
- Lávese las manos cuidadosamente después de manipular la máscara usada.