

# Ropa Protectora Desechable



## Descripción

Nombre del producto: Ropa protectora desechable color azul.

Categoría: no esterilización, no médica

Material: S + PE

Gramaje: 103 gr.

Espesor: 0.14 mm

Estilo: lazos en la parte posterior del cuello y la cintura

Cuello: cuello redondo

Manga: mangas largas

Producto: Impermeable y resistente al agua

Presentación: Bolsa 10 unds.

Color: Azul

Talla: L

## Características:

- Aísla el polvo, partículas, alcohol, sangre, bacterias y virus.
- Se puede usar como abrigo de visita.
- De acuerdo con los estándares higiénicos.
- Buena resistencia a la tracción.
- Excelente para disipar el calor corporal.
- Uso en lugares públicos.

## Aplicación:

- Procesamiento de alimentos, belleza, fabricación, construcción, aplicación higiénica y uso diario.

## Limitaciones de uso:

- No utilizar en sala de operaciones.
- Evitar el contacto con aceites pesados, chispas o llamas, o líquidos combustibles.
- Evitar en ambientes con altos riesgos mecánicos (abrasiones, rasgaduras y cortes).
- Evitar en ambientes con condiciones de calor excesivo.



Cuenta con Certificación:



Prueba de Agua



Impermeable



No lavar



Producto Combustible



No exponer al sol



No lavar en seco



1

Saque el protector desechable de su bolsa.



2

Sacuda suavemente ropa protectora desechable, con el lado del cinturón hacia afuera y el lado limpio hacia usted.



3

Con el collar en la mano derecha y la manga en la mano izquierda, jale el collar hacia arriba con la mano derecha para exponer la mano izquierda.



4

Introduzca la mano derecha.



5

Sostenga el cuello con ambas manos, desde el centro a lo largo del borde del cuello, ate un nudo detrás del cuello.



6

Acomodese ambos lados hacia el frente.



7

Alinear los lados de la prenda.



8

Atar el cinturón.